



BATERIA MEDICA Li-ion PARA DRAGER MS1385MD

SILUJ

Batería Li-ion para Drager MS31385, SC6002XL, SC6802XL de 14,4V y 5,2Ah


- Entre otros para el equipo DRAGER MS1385MD
- Capacidad: 5200mAh
- Tipo de batería: Li-ion
- Voltaje: 14.4 V
- Color batería: Rojo
- Medidas: 141.80 x 67,40 x 27,40mm
- Peso: 392 Gr
- **Este modelo de batería se usa en los equipos de los siguientes fabricantes**
 - Marca **DRAGER** para los equipos siguientes: Drager Infinity Monitor Gamma, Infinity Monitor Gamma XL, Monitor Infinity Gamma, Monitor Infinity Gamma XL, MS31385, SC6002XL, SC6802XL



Referencia 002-CSMS1385MD

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: Capacidad: 5200mAh
Voltaje / Tensión: 14,4V
Gama: Pilas y Baterías
Tecnología: LITIO (Litio)

- En algunas ocasiones es posible que tenga el número de pieza según la marca, este listado le ayudara a buscar el número de pieza en función de la marca
 - El número de pieza en la marca **DRAGER** es MS30502
- **Instrucciones de operación**
 - Por favor cargar la batería durante 12 horas antes del primer uso. Después del uso durante varias horas debe cargarse durante toda la noche para garantizar la capacidad óptima y la vida útil de la batería.
 - Se recomienda una carga completa para todas las baterías nuevas. Después de completar 2-3 ciclos de carga y descarga, la batería alcanzará la capacidad óptima de la batería.
 - Después de que la batería esté completamente cargada, desenchúfela de la fuente de alimentación para evitar la sobrecarga.
 - Desconecte la unidad de carga de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
 - Guarde las baterías a temperatura moderada. Si las baterías no se utilizarán durante un período prolongado, retírelas de los dispositivos y manténgalas en una habitación interior en condiciones normales.
 - Cuando se lleve una batería de repuesto, aislar esta de objetos metálicos como monedas, clips, bolígrafos, etc. cuando lleve una batería adicional.
 - Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) de la batería estén orientados en la dirección correcta.
 - Si es posible, evite cargar y descargar completamente la batería.
- **Advertencia**
 - No instalar las baterías con la polaridad inversa a la indicada en el dispositivo.
 - No continúe cargando las baterías más allá del tiempo especificado.
 - No aplastar, dejar caer, mutilar, ni perforar las baterías con objetos extraños.
 - No use ni cargue las baterías cuando parezca que tienen fugas, están descoloridas, oxidadas, deformadas, emiten olores o son anormales.
 - No derrame agua sobre la batería ni la moje.
 - No deseche las baterías en el fuego o en un incinerador de basura, ni las deje en lugares calientes, como un automóvil expuesto al sol.
 - No intente desarmar, perforar o modificar la batería
- **Precaución**
 - Para evitar daños a la batería, deben evitarse las temperaturas extremas, vibraciones y golpes.
 - Mantenga la batería entre 15 °c y 25 °c para obtener el mejor rendimiento.
 - Cuando la batería esté en llamas, no use agua para apagar el fuego, use arena u otros materiales no combustibles.
 - El almacenaje o desechado debe estar fuera del alcance de los niños.
 - Las especificaciones de este producto pueden cambiar sin previo aviso.
- **Consejo del staff de Siluj:** Si aprecias la Tierra, por favor recicla las baterías.

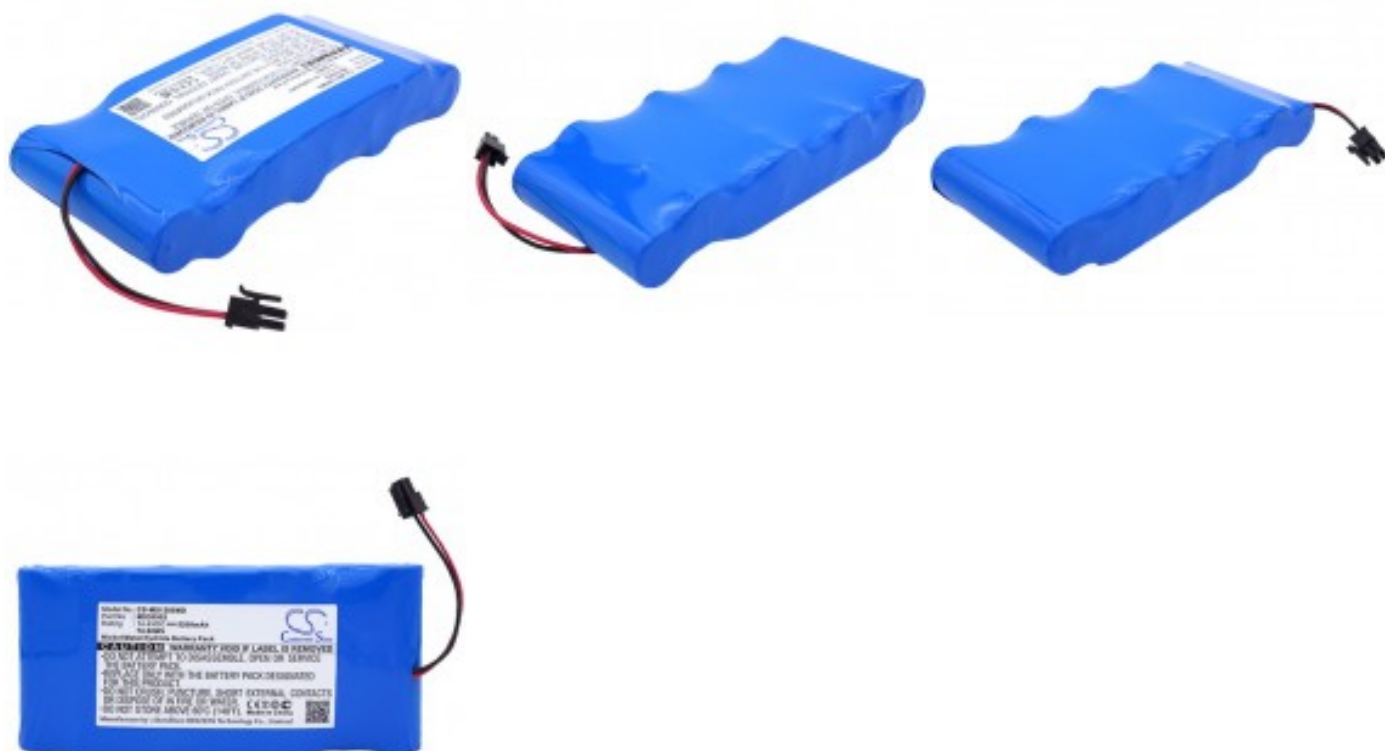

Model No. 33-401-0000
 Part No. 33-401-0000
 Part No. 33-401-0000
 Part No. 33-401-0000
WARNING! WARRANTY VOID IF LABEL IS REMOVED
 DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE, OPEN OR SERVICE
 THE BATTERY PACK.
 DO NOT INSERT INTO THE BATTERY PACK OR DISCARD
 THE BATTERY PACK.
 DO NOT TOUCH EXTERNAL SHORT EXTERNAL CONTACTS
 IN CONTACT OF WITH OR WATER.
 DO NOT STORE ABOVE 40°C (104°F).
 Manufactured by Ultralife Systems Inc. - Canada